

# Így használd a terméket



1. Használat előtt mosson kezet és az utasítás szerint tartsa a tartályt.



2. Távolítsa el a védőkupakot a tartály tetejéről minden használat előtt.  
Ne érjen az ujjaihoz vagy más felülethez a tartály hegye, hogy az oldat bármilyen lehetséges fertőződését megelőzze.



3. Enyhén hajtsa hátra a fejét. Óvatosan húzza le az alsó szemhéját szabad keze ujjával, tartsa a tartályt függőlegesen a szeme felett, és nyomja össze a pumpát, hogy egy csepp oldat a szemébe jusson.  
Vigyázzon rá, hogy a tartály hegye ne érjen a szeméhez, ezzel megelőzve bármilyen sérülést.  
Ezt követően csukja be a szemét és lassan forgassa csukott szemhéj mellett, hogy az oldat megfelelően szétterjedjen a szem felszínén.



4. Használat után azonnal rázzon ki minden maradék cseppet és helyezze vissza a védőkupakot a tartály száraz csúcsára. Az Artelac Splash innovatív pumpamechanizmusa lehetővé teszi, hogy a szemcsepp tartósítószer-mentes legyen és biztosítja a kényelmes cseppentést.  
A megadott töltőtér fogat a tartályból teljesen eltávolítható. A tartály tervezésének köszönhetően csak kis maradék oldat marad a tartályban.