



# Így használja a terméket!



1. Minden használat előtt vegye le az átlátszó fehér védőkupakot a tartály hegyéről, egy csavaró mozdulattal.

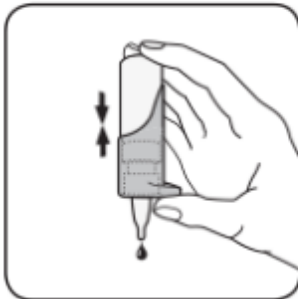

2. Figyelem! Első használat előtt és ha a tartály már egy ideje nem volt használva: Tartsa a tartályt a hegyével lefelé és addig nyomja a pumpát, amíg egy csepp kicseppen.

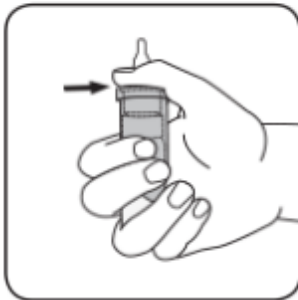

3. Tartsa a tartályt az alábbiak szerint: Helyezze a hüvelykujját az ergonomikus hüvelykujj-tartóra, és ujjáival rögzítse az alsó részt. Két ujját a tartály aljára kell helyezni.



4. Irányítsa a tartályt hegyével lefelé. Hajtsa hátra a fejét. Óvatosan húzza le az alsó szemhéját a szabad kezének egyik ujjával, tartsa a tartályt függőleges helyzetben a szeme felett. Nyomja meg óvatosan a pumpát és cseppentsen egy cseppet a szemébe.